

Provtagningsanvisning Allergi i serum - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 3 Serologi Region Gävleborg
Allergensortiment	Se Allergenlista – Klinisk kemi Allergen som inte analyseras i Gävle skickas vidare till Uppsala.
Provtagning	5 mL, gul propp eller röd propp  För kapillärprov krävs minst 50 µL serum/allergen + 100 µL/analysomgång.
Förvaring/transport	Hållbarhet 1 vecka i kylskåp Frys prov i -20°C vid längre förvaring
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle
Referensintervall	<u>Paneler</u> 0 = negativ 1 = positiv <u>Singelantigen</u> < 0,10 kU/L
Svarstid	Helgfri måndag–fredag Analysen utförs 3 gånger/vecka.
Ackrediterad	Se Allergenlista – Klinisk kemi
Efterbeställning	I undantagsfall
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Positiv panel blir alltid specificerad om inget annat anges på remissen.

Medicinsk bakgrund/ indikation	Indikation: Hjälpmedel att skilja mellan atopiska och icke-atopiska sjukdomar och förutspå sannolikheten att utveckla allergiska sjukdomar. Provet tas vid misstanke om överkänslighet mot specifikt allergen. När patientens anamnes inte är tillräckligt vägledande kan en panel (blandning av en allergenfamilj) väljas. Vid negativt svar på en panel är sannolikheten för allergi mycket låg. Analys av IgE-antikroppar mot allergena komponenter kan ge vägledning om patienten riskerar allvarliga reaktioner vid kontakt med allergenet eller om det är en korsreaktivitet som oftast enbart ger lokala reaktioner. Analysresultaten kan också ge vägledning om det är en bestående allergi eller om tolerans kan utvecklas.
-----------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-05	14	Lagt till revideringstabell.
2024-01-17	15	Lagt till länk till allergenlistan under rubrik "Ackrediterad" för hänvisning till vilka allergener som är ackrediterade.